

Indicatore SealCheckIT

Sistema di prova per la verifica giornaliera del sistema di chiusura e per la Qualifica Operativa (OQ) secondo la norma EN ISO 11607.2: convalida di processo 2006

Le linee guida del WFHSS sulla sterilizzazione consigliano di testare le saldatrici medicali ad inizio giornata dopo il riscaldamento.

Sulla base del test iniziale ed a seguito del risultato ottenuto, l'apparecchio può essere utilizzato per il resto della giornata.

Come funziona?

Posizionare il SealCheckIT all'interno della busta medicale, tra i due strati della busta sul lato dove deve essere effettuata la saldatura.

Effettuare la saldatura.

Sulla striscia nera si evidenzierà la qualità della saldatura ottenuta.

Lo stesso è in grado di visualizzare i seguenti problemi eventualmente riscontrati sulla termo saldatrice:

- temperatura di saldatura troppo bassa
- pressione di saldatura troppo bassa
- interruzione della saldatura

Conformità agli standards:

Gandus Seal CheckIT è conforme alle seguenti norme:

Procedura: ISO 11607 - 2

Materiali: ISO 868 - 3

Caratteristiche tecniche di ciascun foglio:

Dimensioni: 175 x 75 mm. (lunghezza x altezza) - realizzato in:

Carta: 60 gr/m², Medical Grade

Inchiostri utilizzati: non solventi, non tossici, non presenti metalli pesanti

Confezione:

Ogni confezione è realizzata in cartoncino (dim. 180 x 80 x 25 mm.) e contiene n. 250 pezzi.

